


# Endo-Mate DT protocollo di utilizzo

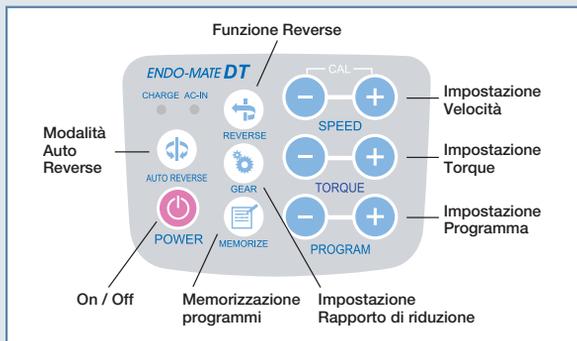

- **Pulsante Power:** accende e spegne il motore.

- **Speed:** regola la velocità. Il valore minimo e massimo impostabile dipende dal tipo di testina in dotazione [vedi pulsante Gear). La testina endodontica ha un rapporto di riduzione 20:1 e spazia da 100 a 650 giri/min.

- **Torque:** imposta il valore limite di Torque tra 0.8 - 6.5 Ncm. Un indicatore progressivo alla base del monitor informa sulla percentuale di attrito che lo strumento esercita rispetto al limite. L'indicazione è anche segnalata acusticamente.

- **Program:** seleziona il programma desiderato.

- **Memorize:** memorizza i valori desiderati in un determinato programma.

- **Gear:** seleziona il rapporto di riduzione del manipolo.

- **Auto Reverse:** modifica il comportamento dello strumento al superamento del limite di Torque impostato. Semplice arresto, arresto e disimpegno in reverse, arresto, disimpegno e ripartenza.

- **Selettore Reverse:** introduce la rotazione antioraria.

