

IPEX / IPEXII

PROBLEMA	CAUSA	INTERVENTO
L'apparecchio non si accende	Le batterie non sono inserite	Inserire le batterie
	Le batterie non sono inserite secondo la corretta polarità (positivo (+), negativo (-))	Riposizionare le batterie secondo la corretta polarità
	Le batterie sono esaurite	Sostituirle con batterie nuove
	La funzione di sicurezza è attivata	Contattare il rivenditore
L'apparecchio si spegne da solo	Controllare se l'indicatore dello stato delle batterie lampeggia lentamente	Se sì, sostituire le batterie consumate con delle nuove
La barra grafica non viene visualizzata	Controllare che la sonda sia inserita.	Connettere la sonda
I numeri del display diventano " - - " durante l'utilizzo	Controllare che la sonda, la clip per strumenti e il cavo per prolunga siano connessi	Connettere sonda, clip per strumenti e cavo per prolunga
Il numero visualizzato sul display è "E 0"	Anomalia interna	Inserire le batterie e riaccendere l'apparecchio. Se viene visualizzato ancora, contattare il rivenditore
Se misurato con un tester, il numero sul display è fuori da "0.2 a 0.9", o non propriamente visualizzato	Controllare che la sonda, la clip per strumenti e il cavo per prolunga siano connessi	Connettere sonda, clip per strumenti e cavo per prolunga
	Controllare che la sonda, la clip per strumenti e il cavo per prolunga non siano rotti	Disconnettere tutti i rispettivi cordoni e inserire direttamente gli elettrodi del tester nell'apparecchio al posto della sonda. Se il numero sul display visualizzato ha un valore tra "0.2 a 0.9" un cordone potrebbe essere rotto. Contattare il rivenditore
	Anomalia nell'unità principale	Disconnettere tutti i rispettivi cordoni e inserire direttamente gli elettrodi del tester nell'apparecchio al posto della sonda. Se il numero sul display visualizzato ha un valore non tra "0.2 a 0.9" o non è ben visualizzato, ci potrebbe essere un'anomalia nel corpo principale. Contattare il rivenditore