

## TEST

## PERIODICITA'

## FUNZIONAMENTO

### INTEGRATORI CHIMICI



Non esiste una periodicità predefinita, se non nelle zone ove vi sono leggi regionali specifiche.  
**Si consiglia l'utilizzo su tutti i cicli.**

Serve a valutare i parametri della macchina tempo - temperatura - pressione, attraverso un viraggio chimico.  
 Gli integratori chimici vanno inseriti all'interno della camera di sterilizzazione prima di dare avvio al ciclo, anche con presenza di carico.

### BOWIE & DICK



Non esiste una periodicità predefinita, se non nelle zone ove vi sono leggi regionali specifiche.  
**Si consiglia l'utilizzo ogni 30 giorni.**

Serve a valutare la capacità di penetrazione del vapore nei corpi porosi. Il test va eseguito con camera vuota. Eseguire l'apposito ciclo, indicato nel display dell'autoclave, al termine estrarre il pacco aprirlo e controllare che il foglio con indicatore chimico posto all'interno e controllare il viraggio.

### HELIX TEST



Non esiste una periodicità predefinita, se non nelle zone ove vi sono leggi regionali specifiche.  
**Si consiglia l'utilizzo ogni 30 giorni.**

Serve a valutare la capacità di penetrazione del vapore nei corpi cavi. Il test va eseguito con camera vuota. Eseguire l'apposito ciclo, indicato nel display dell'autoclave, al termine estrarre il test aprire la capsula e controllare il viraggio dello strip indicatore.

### TEST BIOLOGICO



Non esiste una periodicità predefinita, se non nelle zone ove vi sono leggi regionali specifiche.  
**Si consiglia l'utilizzo ogni 90 giorni.**

Serve a valutare la capacità dell'autoclave di distruggere tutti i microrganismi incluse le spore. Le fiale devono essere inserite nella camera di sterilizzazione, anche con presenza di carico. Lasciare raffreddare per circa 10 minuti poi attivarla. L'indicatore chimico sarà virato. Successivamente, inserire la fiala in un incubatore biologico a 57°C per 48 ore, unitamente ad una fiala test non processata, ma comunque attivata.

### VACUM TEST

Non esiste una periodicità predefinita, se non nelle zone ove vi sono leggi regionali specifiche.  
**Si consiglia l'utilizzo ogni 7 giorni.**

Serve a valutare la capacità di mantenimento del vuoto nei circuiti dell'autoclave e all'interno della camera. Il ciclo va eseguito con camera vuota. Si seleziona l'apposito ciclo indicato nel display dell'autoclave e si attiva. L'esito finale viene emesso dalla stampante tramite una eventuale connessione informatica.