

ICARE+

PROBLEMA	CAUSA	INTERVENTO
L'apparecchio non si accende	Il cavo di alimentazione è collegato correttamente alla corrente ?	Collegare il cavo di alimentazione alla corrente
	Il cavo di alimentazione è collegato correttamente ad iCare+ ?	Inserire il cavo di alimentazione nel connettore principale del dispositivo
	L'apparecchio è acceso ?	Accendere l'apparecchio posizionando l'interruttore su ON
	Si è bruciato un fusibile ?	Sostituire il fusibile
L'unità non pulisce e non lubrifica	La spia della modalità di funzionamento è accesa ?	Premere il pulsante di selezione corrispondente per far accendere la spia della modalità
	Lo sportello è aperto ? (Indicatore LED dello sportello acceso)	Chiudere bene lo sportello
	L'indicatore LED dei liquidi n.Clean e n.Cid è acceso ?	Sostituire il flacone corrispondente e premere Start per riavviare il ciclo
	L'indicatore LED dell'olio è acceso ?	Riempire il serbatoio con l'olio per manutenzione e premere Start per riavviare il ciclo
L'unità non pulisce e non lubrifica in modo adeguato	Il tubo dell'aria è collegato correttamente al connettore dell'aria ?	Collegare saldamente il tubo dell'aria al connettore dell'aria
	La pressione dell'aria è impostata tra 5 e 6 bar ?	Regolare la pressione dell'aria tra 5 e 6 bar
	La modalità selezionata è quella Ciclo Breve ?	Regolare la modalità su Ciclo lungo
	Lo strumento è collegato correttamente all'adattatore?	Collegare correttamente lo strumento
L'indicatore dell'errore lampeggia	Malfunzionamento del motore	Contattare il Centro di assistenza autorizzato
La spia dell'aria emette una luce costante e segnale acustico	La pressione dell'aria è inferiore a 5 bar o superiore a 6 bar	Controllare il livello di pressione. La pressione deve essere compresa tra 5 e 6 bar. In seguito premere Start per resettare l'errore
La spia dell'aria emette una luce lampeggiante e segnale acustico	I canali sono bloccati. Ciò può indicare: tubo bloccato all'interno dell'unità, canale bloccato all'interno dello strumento, programma errato in caso di utilizzo del pulsante "ext-WO" per strumenti con spray esterno	Qualunque sia il messaggio di errore, verificare il problema. Successivamente scollegare gli strumenti, ricollegarli e premere il pulsante Start per resettare l'errore