

iCare

SISTEMA AUTOMATICO DI MANUTENZIONE

iCare

iCare è un nuovo alleato per la cura degli strumenti rotanti. Grazie alla sua facilità di utilizzo e alla molteplicità di funzioni, iCare garantisce un efficace trattamento di pulizia e lubrificazione della manipoleria in modo automatico e completo. Il suo design compatto ed elegante si adatta perfettamente ad ogni studio.

La quantità di soluzione utilizzata è predefinita in base alla tipologia di strumenti da trattare. Il sistema di espulsione ad aria permette di eliminare ogni traccia di soluzione residua. Sicurezza garantita, prolungata durata degli strumenti, grazie anche all'innovativo sistema di pulizia del mandrino.

VANTAGGI

- Soluzione di pulizia calibrata in base allo strumento (turbine, contrangoli e manipoli diritti);
- Pulizia e lubrificazione in rotazione continua;
- Funzione di pulizia del mandrino;
- Modalità di espulsione ad aria per l'eliminazione della soluzione in eccesso;
- Capiente serbatoio dell'olio (1,2 lt) che diminuisce la necessità di rabbocchi.



PULIZIA E LUBRIFICAZIONE AUTOMATICA


SOLUZIONE DI PULIZIA CALIBRATA IN BASE ALLO STRUMENTO

La quantità di soluzione per la manutenzione utilizzata è impostata automaticamente in base al tipo di strumento da trattare (turbine, contrangoli o manipoli dritti) per garantire una lubrificazione precisa e sicura.



AMPIO PANNELLO DI CONTROLLO


Facile da usare, semplice da capire.
Comandi One touch.

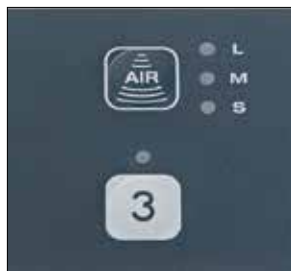

3 PROGRAMMI SELEZIONABILI

Dal pannello frontale è possibile selezionare 3 differenti cicli di trattamento (breve, medio, lungo) con tempistiche preimpostate ottimali per i diversi tipi di strumenti da trattare.

TURBINE

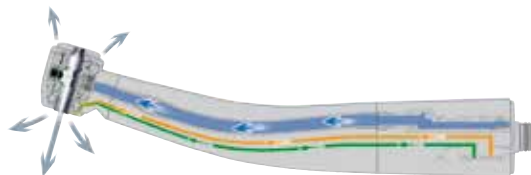

Grazie al sistema a rotazione, iCare pulisce in profondità tutti i componenti interni delle turbine.

CONTRANGOLI



Nei contrangoli sono integrati complessi sistemi di ingranaggi che richiedono soluzioni penetranti. Il sistema a rotazione di iCare assicura una completa ed efficace lubrificazione e pulizia per ogni manipolo.

FUNZIONE DI PULIZIA DEL MANDRINO



Questa funzione permette la completa rimozione di ogni residuo di polvere e sporcizia.



FACILE DA PULIRE

Lo sportello frontale può essere completamente rimosso in modo da facilitare le quotidiane operazioni di pulizia.



CAPPUCCI ASSORBENTI

Cappucci assorbenti (optional) per testine in grado di assorbire l'effetto spray generato.



SERBATOIO DELL'OLIO

La grande capacità del serbatoio pari a 1,2 litri permette di versare un intero flacone di olio (1 lt) in un'unica operazione, diminuendo la frequenza dei rabbocchi. Il beccuccio fornito rende questa operazione facile e pulita.

COMPATIBILITÀ CON OGNI MARCA DI STRUMENTI

Tutti i manipoli NSK e anche quelli di altre marche possono essere collegati direttamente ad iCare. Le turbine richiedono lo specifico adattatore per attacco.



SICUREZZA DI UTILIZZO

Le spie luminose LED indicano la presenza di alcune eventuali anomalie, come un'inadeguata quantità di soluzione o la chiusura errata dello sportello frontale.

PULIZIA E LUBRIFICAZIONE AUTOMATICA



SISTEMA ELEGANTE E COMPATTO

Facile da installare e altamente performante, iCare favorisce il trattamento di 4 strumenti in un unico ciclo. Inoltre, l'elegante design e le dimensioni ridotte lo rendono adatto ad ogni tipo di ambiente.



iCare

2 attacchi per manipoli + 2 attacchi per turbine

MODELLO: CODICE:
iCare C2 (230V) NK0070005



CONTENUTO

- Unità iCare
- Adattatore per la pulizia del mandrino
- Cordone alimentazione
- Olio di manutenzione iCare (1litro)
- Set filtri umidità
- Foglio assorbente per olio
- Filtro aria

CARATTERISTICHE

- Alimentazione : AC 100-240 V 50/60 Hz
- Pressione dell'aria : 0,5-0,6 MPa (5,0-6,0 kgf/cm²)
- Peso : 6.5 kg
- Dimensioni (mm) : L280 x P240 x H350
- Capacità serbatoio : 1 200 ml

* Connettere solo modelli Midwest 4 vie
* È necessario il tubicino dell'aria (5,0-6,0 kgf/cm²)

ADATTATORI PER iCare

MODELLO:	CODICE:	
Adattatore PTL	NK00700PL	• Per turbine NSK attacco PTL-CL-LED
Adattatore B2/M4	NK00700AM	• Per turbine Borden 2 vie
Adattatore KV	NK00700KA	• Per turbine Kavo® attacco MULTiflex® LUX
Adattatore SR	NK00700SI	• Per turbine Sirona® attacco Sirona®
Adattatore WH	NK00700WH	• Per turbine W&H® attacco Roto Quick
Adattatore BA	NK00700BA	• Per turbine Bien-Air® attacco Unifix®

Verificare con il rivenditore l'adattatore adeguato per i manipoli di altre marche.

ACCESSORI

MODELLO:	CODICE:	
Olio di manutenzione per iCare 1 flacone da 1 litro	NK0070007	
Filtri umidità 12 pz.	NK0070FIO	
Fogli assorbenti per olio 10 pz.	NK0070CAR	
Filtro aria	NK0070FIA	
Adattatore pulizia mandrino Pulizia mandrino	NK0070008	
HP cappucci 200 pz.	NK0070009	

KaVo® e MULTiflex® LUX sono marchi registrati da Kaltenbach & Voigt GmbH & Co. Sirona® è un marchio registrato da Sirona Dental Systems GmbH. W&H® è un marchio registrato da W&H Dentalwerk Bürmoos GmbH. Bien-Air® e Unifix® sono marchi registrati da Bien-Air Dental S.A



CREATE IT

DISTRIBUTORE ESCLUSIVO PER L'ITALIA
DENTALICA S.P.A. | 20142 Milano | Via Rimini, 22
T 02.895981 | F 02.89504249
dentalica@dentalica.com | www.dentalica.com



Powerful Partners